

Flüssigsauerstoffversorgung HEIMOX®.

Kurzanleitung tragbarer Behälter Companion.

Wie nehme ich die tragbaren Flüssigsauerstoffbehälter Companion T500 und T1000 in Betrieb?




- a) Füllstandsanzeige überprüfen.
- b) Füllanschlüsse am stationären und tragbaren Behälter gut trocknen.
- c) Tragbarer Behälter über die entsprechende Aussparung am stationären Behälter halten.



- a) Behälter nach unten drücken und Hebel des Abgasventils öffnen.
- b) Abgasventil schliessen, sobald sich das Zischen des entweichenden Gases ändert und ein weisser Nebel sichtbar wird.
 - Sollte sich das Abgasventil nicht schliessen, den tragbaren Behälter abtrennen (siehe Punkt 3a).



- a) Tragbarer Behälter am Tragegurt anheben und den Entriegelungsknopf betätigen.
 - Lässt sich das Gerät nicht trennen, einige Minuten warten und den Vorgang wiederholen.
 - Sollte bei der Trennung ein Leck auftreten, den Behälter erneut aufsetzen. Dadurch lösen sich Eiskristalle oder Partikel.

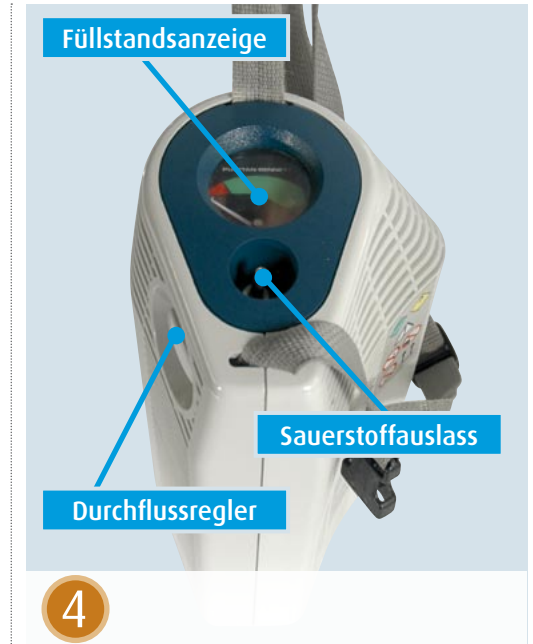


- a) Inhalt des tragbaren Behälters prüfen: Behälter am Tragegurtende nahe der Füllstandsanzeige anheben.
- b) Sauerstoff-Nasenbrille an den Sauerstoffauslass anschliessen und Durchflussregler gemäss ärztlicher Verordnung einstellen.
 - Behälter ausschliesslich in der aufrechten Position verwenden.

Flüssigsauerstoffversorgung HEIMOX®.

Kurzanleitung stationärer Behälter Companion.

Wie nehme ich den stationären Behälter Companion S41 in Betrieb?

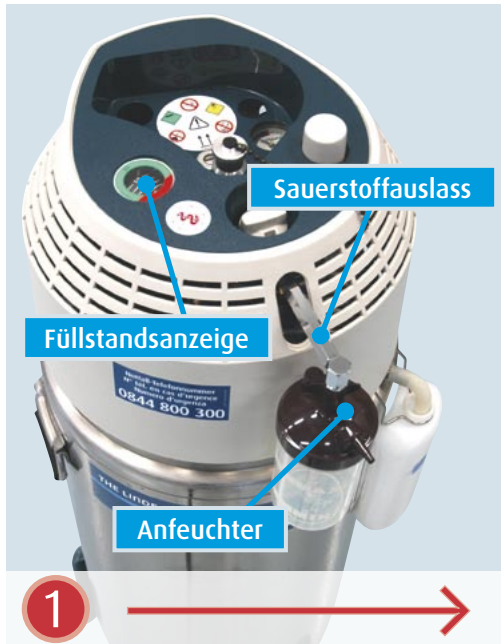

- a) Füllstandsanzeige überprüfen.
 - b) Anfeuchter bis zur Markierung mit destilliertem Wasser füllen und an den Sauerstoffauslass anschrauben.
- Anfeuchter korrekt anschrauben, andernfalls entweicht Sauerstoff.



- a) Sauerstoffschlauch über den Ausgangsnippel des Anfeuchters stülpen und mit der Nasenbrille verbinden.
 - b) Durchflussregler gemäss der ärztlichen Verordnung einstellen (z.B. Stufe 2 = 2 l/min).
- Steht der Regler zwischen zwei Markierungen, strömt kein Sauerstoff.

Tipps

Für den stationären Behälter

- Sauerstoffschlauch in ein Wasserglas halten. Anhand der Blasenbildung ist zu erkennen, ob Sauerstoff fliesst. Bilden sich wenige oder keine Blasen, Schlauch und Anschlussstellen prüfen.
- Regelmässig den Sauerstoffvorrat im stationären Behälter überprüfen. Sollte der Behälter vor der regulären Befüllung leer werden, bitte umgehend PanGas informieren (0844 800 300).
- Darauf achten, dass Sauerstoffschlauch und Nasenbrille nicht geknickt sind. Bei abgeknickter Nasenbrille pfeift die Anfeuchterflasche.

Für den tragbaren Behälter (siehe Rückseite)

- Tragbarer Behälter nach dem Befüllen ca. 15 Minuten ruhen lassen, damit sich der optimale Betriebsdruck aufbauen kann.
- Nach jeder Befüllung mindestens 30 Minuten bis zur nächsten Befüllung warten, um einen Verlust von ungenutztem Sauerstoff und ein Einfrieren des Abgasventils zu vermeiden.