




# Flüssigsauerstoffversorgung HEIMOX®.

## Kurzanleitung stationärer Behälter Helios.

### Wie nehme ich den stationären Behälter Helios S46 in Betrieb?

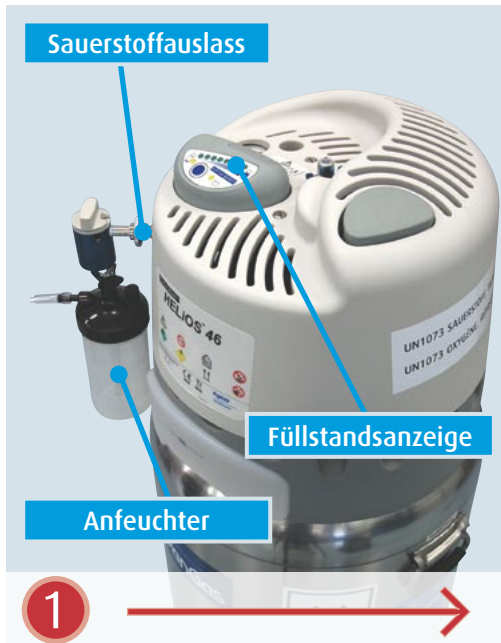

- a) Füllstandsanzeige überprüfen.
- b) Anfeuchter bis zur Markierung mit destilliertem Wasser füllen und an den Sauerstoffauslass anschrauben.

→ Anfeuchter korrekt anschrauben, andernfalls entweicht Sauerstoff.

- a) Sauerstoffschlauch über den Ausgangsnippel des Anfeuchters stülpen und mit der Nasenbrille verbinden.

- b) Durchflussregler gemäss der ärztlichen Verordnung einstellen (z.B. Stufe 2 = 2 l/min).

→ Steht der Regler zwischen zwei Markierungen, strömt kein Sauerstoff.

## Tipps

### Für den stationären Behälter

- Sauerstoffschlauch in ein Wasserglas halten. Anhand der Blasenbildung ist zu erkennen, ob Sauerstoff fliesst. Bilden sich wenige oder keine Blasen, Schlauch und Anschlussstellen prüfen.
- Regelmässig den Sauerstoffvorrat im stationären Behälter überprüfen. Sollte der Behälter vor der regulären Befüllung leer werden, bitte umgehend PanGas informieren (0844 800 300).
- Darauf achten, dass Sauerstoffschlauch und Nasenbrille nicht geknickt sind. Bei abgeknickter Nasenbrille pfeift die Anfeuchterflasche.

### Für den tragbaren Behälter (siehe Rückseite)

- Tragbarer Behälter nach dem Befüllen ca. 15 Minuten ruhen lassen, damit sich der optimale Betriebsdruck aufbauen kann.
- Nach jeder Befüllung mindestens 30 Minuten bis zur nächsten Befüllung warten, um einen Verlust von ungenutztem Sauerstoff und ein Einfrieren des Abgasventils zu vermeiden.